

# MANUAL DE USUARIO

## ORUGA GAL-2



 **galquiler**  
*alquiler con derecho a compra*

# BREVE INTRODUCCIÓN

Los siguientes símbolos se utilizan a lo largo de este manual:



Precaución: El incumplimiento de este aviso puede resultar en lesiones.



Nota: El incumplimiento de este aviso puede resultar en daños a la unidad o a las instalaciones.

Antes de la operación inicial:

- Lea el manual de usuario y tome nota de todas las advertencias e instrucciones de seguridad.
- Tenga en cuenta los datos técnicos, ya que no se puede exceder la capacidad de elevación.
- Compruebe todas las funciones electrónicas, los frenos de seguridad y la posición de la pista de escalada.

Notas generales de uso:

- El operador del salvaescaleras para sillas de ruedas debe estar capacitado.
- El operador del salvaescaleras para sillas de ruedas debe ser físicamente capaz de operar la unidad.
- Si la unidad ha estado a temperaturas igual o inferiores al punto de congelación durante un período de tiempo prolongado, espere al menos una hora después de mover la unidad a un ambiente más cálido antes de operar la unidad.
- Use calzado antideslizante y opere siempre con ambas manos.
- Practique el funcionamiento sin carga y a baja velocidad inicialmente.
- El salvaescaleras para sillas de ruedas no debe utilizarse para el transporte de carga.
- No lo use bajo la lluvia, condiciones húmedas o sobre nieve o hielo.
- No lo use si las ruedas o la pista de escalada están rotas o si alguna parte del marco está suelta.
- No lo use en escaleras mecánicas o pasillos.
- Apague la unidad cuando se transporte a diferentes ubicaciones.
- Mantenga secos los elementos enchufables.
- Proteja la batería y el cable de carga evitando el aceite y la grasa.
- No utilice productos de limpieza agresivos.
- No utilice métodos de limpieza a alta presión.
- Las reparaciones solo pueden ser realizadas por personal certificado y experimentado
- Manténgase alejado de llamas desnudas.
- La batería puede interferir con los campos electromagnéticos sensibles de otros dispositivos electrónicos (por ejemplo, sistemas antirrobo en grandes almacenes).
- Solo se deben utilizar accesorios originales.

Durante el funcionamiento de la unidad:

- Nunca cambie los ajustes al subir o bajar escaleras.

- Nunca coloque ninguna parte del cuerpo, especialmente los pies, debajo de las pistas de escalada.
- Si los elementos de accionamiento se bloquean, apague la unidad inmediatamente.


## ESPECIFICACIONES

- Capacidad de carga: 200 kg
- Ángulo de las correas de goma: 20°
- Peso neto: 33 kg
- Cargador: 29.4V 2ª


Voltaje adaptable: 110/240v

- Potencia de trabajo: CA 100-240 V 50/60 Hz
- Motor: 24V 200W, 3 velocidades
- Batería: 24 V / 13 Ah
- Tamaño: 77x70x165cm
- Tamaño plegada: 108x47x28cm
- Peso bruto: 43kg

Dimensiones de las partes principales:

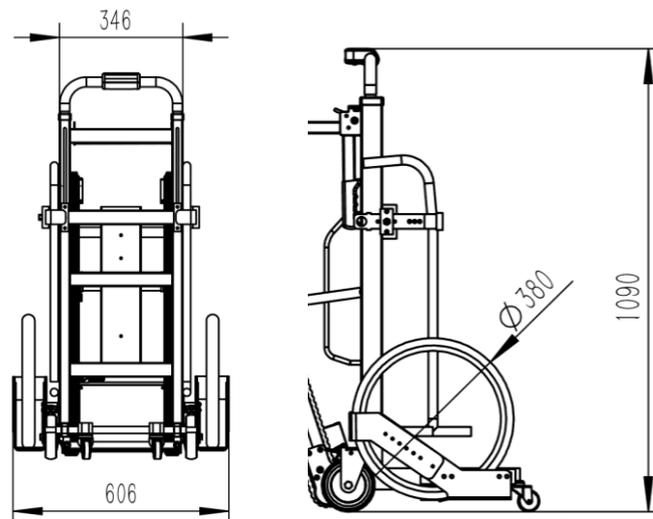

# Requisitos de las escaleras

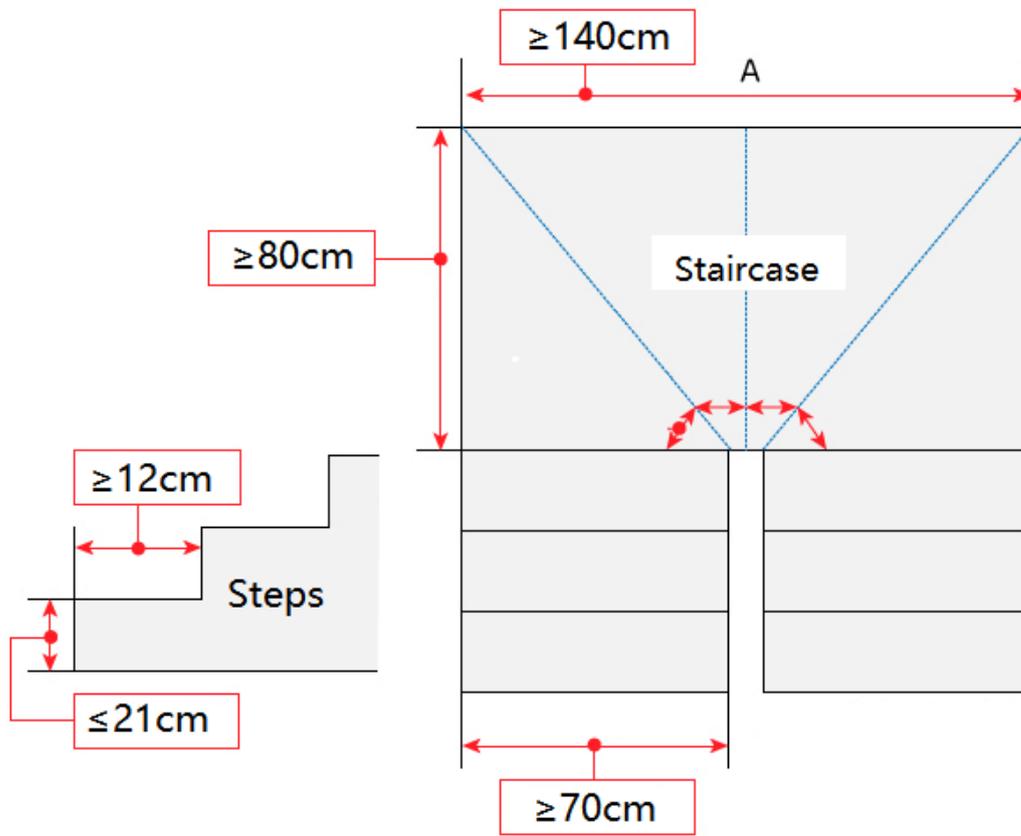

# 1. OPERACIÓN INICIAL

**⚠** Antes de la operación inicial, asegúrese de que el ELEVADOR DE ESCALERAS funcione en un entorno superior a 0 °C.


El interruptor de encendido se encuentra en la batería, presione el botón rojo para encender la fuente de alimentación. Presione el botón redondo en el panel indicador de carga de la batería. Las luces verdes se iluminarán si hay una carga. 1 luz = 25% de carga, 2 luces = 50% de carga, 3 luces = 75% de carga Y 4 luces = 100% de carga. Asegúrese de que la unidad esté cargada antes de usarla. En la tercera imagen el controlador de batería en el mango superior, confirma el porcentaje de carga a más del 25%.




- !** Nunca deje a un usuario de silla de ruedas desatendido en la unidad y siempre use los cinturones de seguridad suministrados.
- !** El salvaescaleras para sillas de ruedas solo debe ser operado por personal capacitado.
- !** La unidad debe operarse con las dos manos en todo momento.
- ⚠** La batería debe estar completamente cargada antes de usarla por 1ª vez.

# 2. CARGA DEL USUARIO EN SILLA DE RUEDAS


Coloque la unidad cerca de las escaleras, pero lo suficientemente lejos como para permitir que el usuario de silla de ruedas se cargue de manera segura. Bloquee las ruedas de la unidad. Extienda la manija de operación presionando la parte inferior de la varilla roja en la parte posterior del marco (como se muestra en la imagen inferior) y tirando hacia arriba de la manija. Cuando se alcance la posición deseada, suelte la varilla roja. Se pueden seleccionar 3 alturas. Asegúrese de que la manija de operación esté bloqueada en su posición tirando de la manija con la varilla suelta.

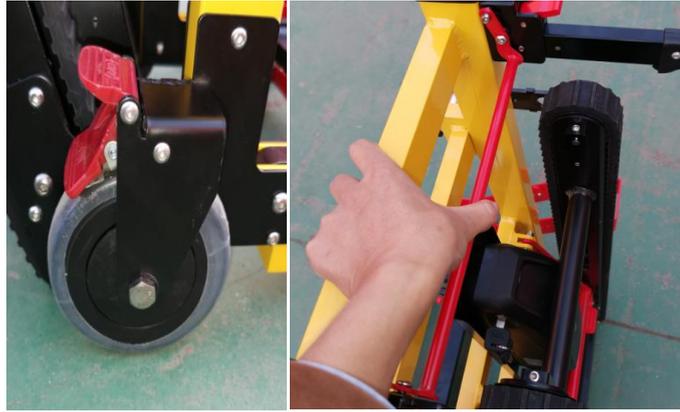

Ajuste cada pestillo de bloqueo al tamaño apropiado para la silla de ruedas mediante los tornillos hexagonales como se ve en las imágenes inferiores. Ajustar el soporte del retén hacia arriba o hacia abajo, tornillo de cabeza para deslizar el pestillo de bloqueo hacia afuera o hacia adentro según sea necesario.

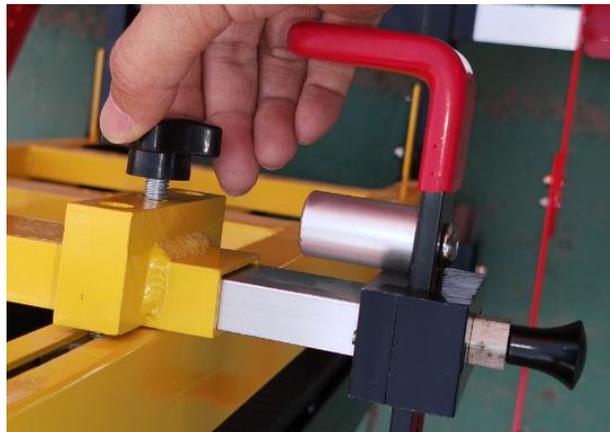

Tirar del anillo de bloqueo hacia arriba/fuera del pestillo de bloqueo para ajustar el pestillo de bloqueo.

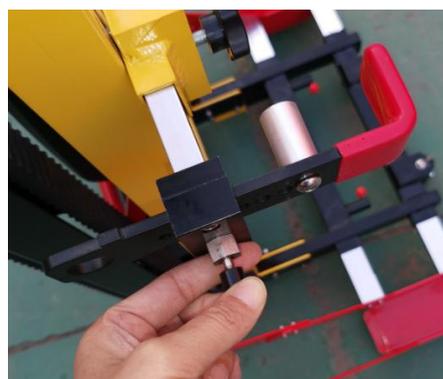

Ajustar la posición de cada bandeja de carga de rueda tirando del anillo de bloqueo lejos de la unidad y deslizando la bandeja de carga hasta el ancho deseado.



Mueva la silla de ruedas en la unidad como se muestra. Las ruedas principales de la silla de ruedas deben estar firmemente asentadas en las bandejas de carga. Los pestillos de bloqueo deben asegurar la parte posterior de la silla de ruedas. El reposacabezas debe estar en una posición cómoda para el usuario de la silla de ruedas. Realice los ajustes necesarios antes de mover la silla. Asegure la silla de ruedas y al usuario en su lugar con los cinturones de seguridad. Bloquee las ruedas principales del salvaescaleras.



### 3. SUBIR ESCALERAS

- ❗ Nunca toque ninguna parte de las pistas de escalada cuando la unidad esté encendida.
- ❗ Asegúrese siempre de que todas las partes de la unidad estén bien bloqueadas en su lugar, especialmente los rieles para subir escaleras, antes de subir escaleras.
- ❗ Practique el funcionamiento sin carga y a BAJA velocidad inicialmente.

Coloque la unidad en la base de las escaleras. Bloquee las ruedas de la unidad. Inspeccione visualmente las escaleras para asegurarse de que no haya riesgos de seguridad, incluidos escombros, hielo o agua. Suelta las pistas de escalada pisando la placa roja. Asegúrese de que las pistas de escalada estén lo más cerca posible de las escaleras y firmemente bloqueadas en su posición.



Encienda la unidad pulsando el botón rojo de encendido POWER.



Incline la unidad hacia atrás hasta que la pista de escalada esté en contacto con las escaleras. Presione el botón UP en la unidad de control para comenzar a moverse.



Cuando haya llegado a la parte superior de las escaleras, mueva la unidad completamente hacia el rellano y devuelva la unidad a una posición vertical. Presione el botón rojo POWER para apagar las pistas de escalada. Mueva la unidad lo suficientemente lejos de las escaleras para permitir que el usuario de la silla de ruedas pueda descargarse de manera segura. Bloquee las ruedas de la unidad. Desabrocha los cinturones de seguridad y desengancha los bloqueos de las ruedas de la silla de ruedas y los cierres de bloqueo de la unidad. Empuje la silla de ruedas hacia adelante hasta que esté lejos de la unidad.

## 4. BAJAR ESCALERAS

- ❗ Nunca toque ninguna parte de las pistas de escalada cuando la unidad esté encendida.
- ❗ Asegúrese siempre de que todas las partes de la unidad estén bien bloqueadas en su lugar, especialmente los rieles para subir escaleras, antes de subir escaleras.

Coloque la unidad en la parte superior de las escaleras. Bloquee las ruedas de la unidad. Inspeccione visualmente las escaleras para asegurarse de que no haya riesgos de seguridad, incluidos escombros, hielo o agua. Suelte las pistas de escalada (como se describió anteriormente) y asegúrelas firmemente en su posición.



Encienda la unidad de control pulsando el botón rojo POWER. Incline la unidad hacia atrás y empuje con cuidado la unidad hacia las escaleras hasta que las pistas de escalada se enganchen en las escaleras. Presione el botón ABAJO en la unidad de control para comenzar a mover.



Si es posible, coloque a una segunda persona en las escaleras para estabilizar la unidad mientras la maniobra para colocarla en posición. Cuando haya llegado al pie de las escaleras, vuelva a colocar la unidad en posición vertical. Presione el botón rojo POWER para apagar las pistas de escalada. Mueva la unidad lo suficientemente lejos de las escaleras para permitir que el usuario de la silla de ruedas pueda descargarse de manera segura. Bloquee las ruedas de la unidad. Desabrocha los cinturones de seguridad y desengancha los bloqueos de las ruedas de la silla de ruedas y los cierres de bloqueo de la unidad. Empuje la silla de ruedas hacia adelante hasta que esté lejos de la unidad.

## 4. PLEGADO

Retire cada bandeja de carga de la rueda tirando del anillo de bloqueo para alejarlo de la unidad y deslizando la bandeja completamente libre de la unidad. Coloque la unidad en el suelo. Debajo de la paleta de carga hay una varilla roja, tirando de la varilla hacia arriba y luego presione ligeramente sobre la paleta de carga. La unidad se plegará.



## 4. MANTENIMIENTO

### 4.1. Carga de la batería:



- Cargue la unidad después de cada uso, el porcentaje mínimo de carga es del 25%.
- Proteja el cargador y los cables de carga del aceite, la grasa, el detergente, el diluyente o cualquier líquido potencialmente dañino.
- Siga las instrucciones de funcionamiento para cargar la batería.
- La nueva batería alcanzará su estado óptimo después de varios ciclos de carga y descarga.

Apaga el botón que se muestra en la imagen. El puerto de carga se encuentra junto al interruptor de encendido. Desatornille la tapa del puerto de carga. Conecte el cable de carga al puerto de carga. Conecte el cable de carga a una toma de corriente. Cuando la batería esté cargada, retire el cable de carga y vuelva a atornillar la tapa del puerto de carga en su lugar. La batería con dos llaves y se puede usar para bloquear la batería en la unidad.



#### 4.2. Limpieza

Limpie la unidad y sus piezas con un paño limpio o un cepillo suave y agua tibia y jabón. Enjuague con agua tibia y seque al aire. No limpie con productos que contengan lejía o fenol. Si es necesario, se puede utilizar un cepillo de cerdas duras.

#### 4.3. Reciclaje

Los productos Stair Climbers están diseñados para tener una larga vida útil. Sin embargo, si su unidad está cerca del final de su vida útil, puede devolverla al fabricante para su reciclaje.